



邁步明天



矽膠義肢- 半訂做產品手冊

目錄

- 半訂做(SCM)
- 訂購過程
 - 收集患者資料
 - 製作試樣產品
 - 試樣產品反饋
 - 製作正式產品
- 良好的保養
- 使用矽膠義肢前後

半訂做(SCM)

- **什麼是半訂做?**

- 半訂做不是全訂做

 半訂做的概念是根據健肢尺寸, 改變我們矽膠標準產品的尺寸, 以便為患者提供舒適的穿戴.

- 半訂做產品是根據標準產品的模具去改變尺寸

- 改變尺寸大概只可以在1-2個尺碼調整
- 例如把中碼擴大為大中碼/大碼, 或縮小至中小碼/小碼
- 但不能把加小碼擴大至加大碼, 或加大碼縮小至小碼

 **請注意!!指甲和紋路是不能修改!**

- 當患者選擇尺碼的時候:

1. 先選與殘肢相近的尺寸的尺碼
2. 再從尺碼中選擇與健肢指甲和紋路較為接近的尺碼

半訂做(SCM)

- **患者何時需要訂購半訂做？**



當產品要與殘肢配合

適合手指, 半掌, 半足, 前臂肌肉缺失和小腿肌肉缺失的患者

- **那些型號是高度建議製作半訂做？**

- 手指型號 200 系列
- 半掌手套 103
- 美容手套 102L/102LL
- 半腳掌 HDSF 系列
- 手臂筒 SL
- 小腿套 BKSL

- **那些型號是不能製作半訂做？**

- 肌電/機械手套型號 100 / 100L
- 嬰兒爬行手型號 CH

訂購過程

1. 收集患者資料
2. 製作試樣產品
3. 試樣產品反饋
4. 製作正式產品

收集患者資料: 手 (第一步)

- 選擇合適的訂購表格: S1, S2, S3
- 表格頂部會有相關型號
- 必需填寫以下資料:

- 患者名稱
- 性別
- 左右
- 顏色, 可參考以下影片:
- 提升項目
- 備註



如果不知道該選那個尺碼, 可以不填寫尺碼。我們客戶服務員會提供建議給你。



皇室義肢有限公司

半訂做(SCM)訂購表格
型號103半掌截肢

V2.0.2022

PG-05

S1

患者名稱 _____ 年齡 _____ 性別 _____ 職業 _____
病人聯繫電話 / 電郵 _____
截肢位置及情況 _____

注1: 如果殘肢正在發炎, 在殘肢消炎後, 假肢可能會不合適。
注2: 如果殘肢上有未癒合的傷口, 請避免穿戴假肢。假肢應該在殘肢傷口完全癒合後穿戴。
注3: 如果殘肢敏感, 請修整(加厚)石膏模以減少敏感區域的壓力。

型號103半掌截肢		皇室 2015 年目錄 參考頁碼	訂購編碼	輸入編碼
截肢 位置	型號	半掌截肢用	49	103
	性別, 尺碼	請參考 2015 年目錄第 54-99 頁		
	左右	左 / 右	L / R	
	顏色 - 單色	請使用適當的色板		
表面及外觀 美化	半訂做	半訂做	7	SCM SCM
	顏色	雙色 (例: D3 - P2) 客戶自定顏色 (需要客戶提供色版)	14	D / P CC
	指甲, 毛髮	X 系列	16	X
		- 毛髮形態 (2D, 3D)		2D / 3D
		- 毛髮顏色 (棕黑色, 棕色, 黑色)		BB / BR / BL
	亞加力指甲	17	ACRN	
穿衣便	穿衣便	19	SC	
提升 功能	按壓填充	- 海綿, 矽膠, 海綿和矽膠混合	21	F / S / F+S
	手指結構	加繩線 / 加被動指節	23	W / HF
	拉鍊	閉膠拉鍊 (默認) / 不加拉鍊 (NZ)	25	NZ
有特別的截剪要求嗎? (如有, 請確保有標示剪截線)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否
殘肢上的手指可以彎曲嗎? (如有, 哪根手指可以彎曲呢: _____)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否
大魚肌能否活動?				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否
去掉假肢上的手指以加強活動性。 (請把需要去掉的假肢手指寫在這裡: _____)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否
寄出正式產品, 同時歸還石膏模? (請留意, 我們已採用 3D 掃描技術儲存石膏模 / 蠟模的資料, 故客戶之石膏模 / 蠟模會在製作流程中銷燬)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否

備註: _____

電話: +852 2771 8901 傳真: +852 2384 5948 電郵: info@regalprosthesis.com 網址: www.regalprosthesis.com

香港皇室義肢有限公司

一間有 ISO13485:2016 及 ISO9001:2015 認證的公司 值得您信賴的夥伴

收集患者資料: 手 (第一步)

- 測量尺寸
 - 觀看以下影片可以了解如何測量尺寸: <https://youtu.be/uxkqtiJ4k4U>
 - 請勿將測量尺寸填寫在圖表上!
 - 圖表只是參考, 並告知你製作時所需的測量數據



皇室義肢有限公司

半訂做(SCM)訂購表格
型號103半掌截肢

V2.0.2022
pg.3/5


S1

1:1 圖表指引

1. 以(毫米□/英寸□)填寫以下頁面需要的尺寸。
2. 在圖表中用“+”號標記敏感區域的位置。
3. 請提供儘量多的尺寸, 這有助於製作更貼服的試樣產品。如需要, 可以在訂購表格上稍做修改。
4. 所有長度應該在掌心方向量度。

○ = 長度

□ = 圓周

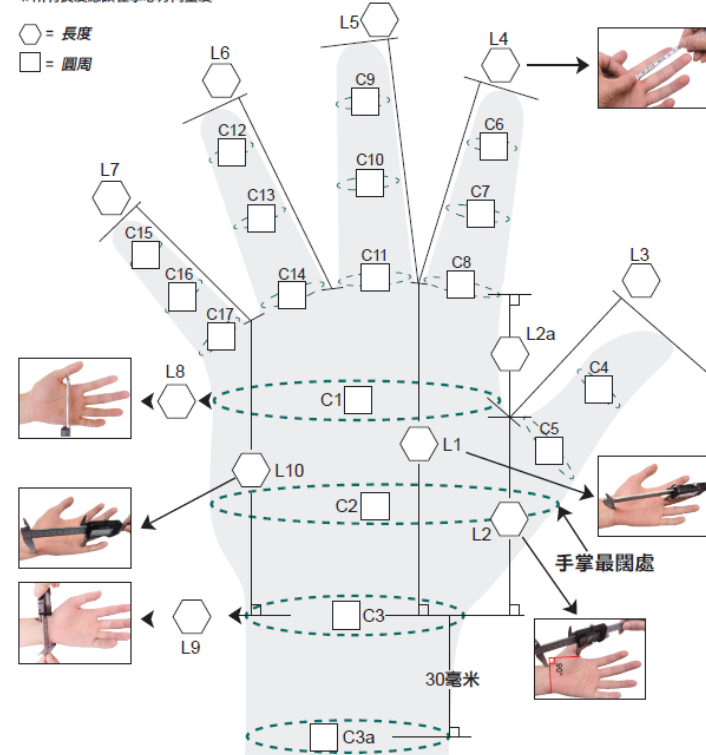

這是一個例子,
請在下一頁勾畫手的輪廓及填寫測量的數據

電話: +852 2771 8901

傳真: +852 2384 5648

電郵: info@regalprosthesis.com

網址: www.regalprosthesis.com

香港皇室義肢有限公司

一間有著 ISO13485:2016 及 ISO9001:2015 認證的公司 值得您信賴的夥伴

收集患者資料: 手 (第一步)

- 先於空白頁畫殘肢和健肢的型態



在圖紙上標記尺寸(請按照示意圖的測量要求, 不要漏掉任何測量)

- 右下角的圖示只作為參考

皇室義肢有限公司
REGAL
半訂做(SCM)訂購表格
型號103 半掌假肢

V1.0 2020 P9.55
健肢
S1

半訂做 (做試樣產品) 半訂做 (不做試樣產品) *請仔細量度患者尺寸和取模

- 請在下面以1:1勾畫健肢 (如位置不夠可在其他紙張上) 並在上面填寫上第3頁要求的尺寸。
- 當填妥表單數據後, 請掃描並以附件形式電郵給我們。
- 電子版表格, 請點擊第一頁文檔頂部按鈕, 發送數據給我們。
*訂單號碼為必填項。

*這些資料只可以當作額外的補充, 並不可以取代石膏模。

電話: (852) 2771 8991 傳真: (852) 2396 9848 電郵: info@regalprostheses.com 網址: www.regalprostheses.com
香港皇室義肢有限公司 一間有著 ISO13485:2016 及 ISO9001:2015 認證的公司 值得您信賴的伙伴

皇室義肢有限公司
REGAL
半訂做(SCM)訂購表格
型號103 半掌假肢

V1.0 2020 P9.48
殘肢
S1

半訂做 (做試樣產品) 半訂做 (不做試樣產品) *請仔細量度患者尺寸和取模

- 請在下面以1:1勾畫殘肢 (如位置不夠可在其他紙張上) 並在上面填寫上第3頁要求的尺寸。
- 當填妥表單數據後, 請掃描並以附件形式電郵給我們。
- 電子版表格, 請點擊第一頁文檔頂部按鈕, 發送數據給我們。
*訂單號碼為必填項。

*這些資料只可以當作額外的補充, 並不可以取代石膏模。

電話: (852) 2771 8991 傳真: (852) 2396 9848 電郵: info@regalprostheses.com 網址: www.regalprostheses.com
香港皇室義肢有限公司 一間有著 ISO13485:2016 及 ISO9001:2015 認證的公司 值得您信賴的伙伴

收集患者資料: 手 (第一步)

- 型號102L/102LL, 為手腕或手腕以上截肢患者測量時:

1. 測量健肢尺寸
2. 測量殘肢前臂的圓周

! 如果患者有接受腔, 每30毫米量度接受腔的圓周

- 如果患者直接穿戴手套, 每30毫米量度殘肢的前臂圓周

- 如果患者還沒有製作接受腔, 每30毫米量度健肢的圓周

- 填寫型號102L時, 至少要量度殘肢前臂手腕以上 80毫米-90毫米的圓周




皇室義肢有限公司
半訂做(SCM)訂購表格
型號101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢及手臂筒

V2.0.2022
P3.4/5

S2

1:1圖則指引

1. 以(毫米□/英寸□)填寫以下頁面需要的尺寸。
2. 在圖表中用“+”號標記敏感區域的位置。
3. 請提供儘多的尺寸,這有助於製作更貼服的試樣產品。如需要,可以在訂購表格上稍做修改。
4. 所有長度應該在掌心方向量度。

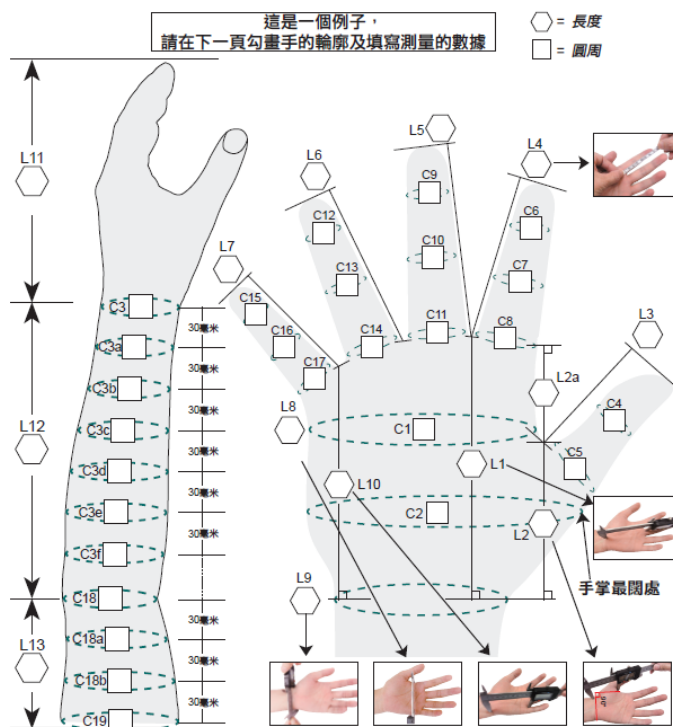

電話: +852 2771 8991 傳真: +852 2384 5648 電郵: info@regalprosthesis.com 網址: www.regalprosthesis.com

香港皇室義肢有限公司

一間有著 ISO13485:2016 及 ISO9001:2015 認證的公司 值得您信賴的夥伴

收集患者資料: 手 (第二步)

- 拍攝健肢和殘肢的照片
 - 照片越多, 我們掌握患者情況的資訊便越多
 - 至少拍攝殘肢和健肢手背
 - 將健肢和殘肢並列



收集患者資料: 手 (第二步)

- 殘健肢合十, 手腕對手腕
- 當訂購型號102L/ 102LL時, 讓患者雙手自然垂直拍照

 對於手腕以上截肢, 我們不建議直接穿戴手套。患者應佩戴接受腔並訂購型號102LS/102LSL



收集患者資料: 手 (第三步)

- 取模
 - 至少要為殘肢取模
 - 製作陽模
 - 如石膏上沒有顯示手腕位置, 請標記手腕位置
 - 標記敏感點
 - 至少取型手腕以上 80毫米-90毫米
 - 型號102LS / 102LSL配戴接受腔, 可以跳過取模. 我們只需接受腔的尺寸。

收集患者資料: 手 (第三步)


- 取模後，檢查石膏是否與圖紙上的尺寸相同

! 確保兩邊的數據差異不超過 4%

- 否則，修磨石膏直至與圖紙數據相近



測量石膏尺寸是否與圖紙相同

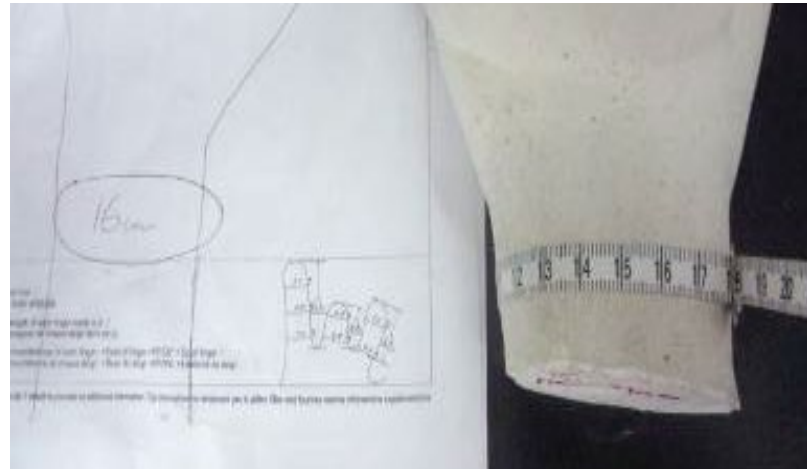



修磨石膏，
上圖顯示石膏與圖紙之間的差異

收集患者資料: 手 (第三步)

- 當患者是手腕截肢, 但不用接受授腔時, 可以穿戴型號102L / 102LL手套。
- 你需要在模型上標記對線, 這樣我們才知道手掌虎口的位置。



用激光線確認健肢
手掌虎口, 把相同
位置移到殘肢, 並
將殘肢的對線複製
於石膏上

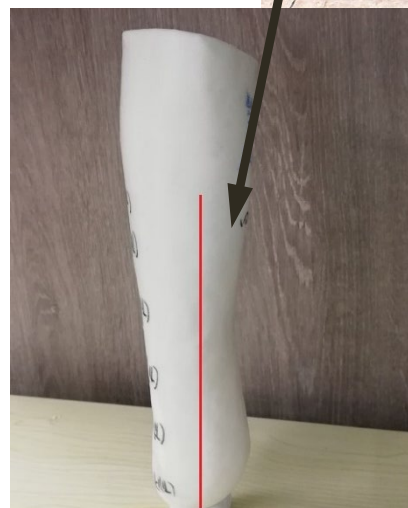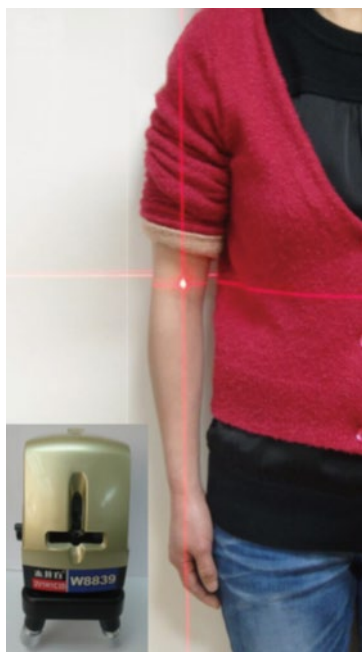

收集患者資料: 腳 (第一步)

- 選擇合適的訂購表格: S4, S5, S6

- 訂單頂部會有相關型號

- 必須填寫以下資料:

- 患者名稱
- 性別
- 左右
- 顏色, 可參考以下影片:
- 提升項目
- 備註



如果你不知道要選那一個尺碼, 可以不填尺碼。我們客戶服務員會建議給你。

REGAL 皇室義肢有限公司 V1.8.2023
P02.008

半訂做(SCM)訂購表格
型號HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 腳掌義肢

S4

患者名稱 _____ 年齡 _____ 性別 _____ 職業 _____

病人聯繫電話 / 電郵 _____

截肢位置及情況 _____

注1: 如果腳腕正在發炎, 在腫脹消失後, 假肢可能會不合適。
 注2: 如果腳腕上有未癒合的傷口, 請避免穿戴假肢。假肢應該在腳腕傷口完全癒合後穿戴。
 注3: 如果腳腕敏感, 請考慮 (加厚) 石膏襯以減少敏感區域的壓力。

型號	HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 腳掌義肢	皇家 2015 年訂做 參考尺碼	訂購號碼	輸入號碼
腳 尺碼	型號	標準型號	100-101	HDSF, HDSFHT
		加粗腳掌型號		HDSF-ER, HDSFHT-ER
	尺碼	請參考 2015 年目錄第 108-120 頁		
	左右	左 / 右		
顏色 - 單色	顏色 - 單色	請使用適當的色板		
	半訂做	半訂做	7	SCM
	顏色	雙色 (例: D3 - P2)	14	D/P
		客戶自定顏色 (請要客戶提供色板)		CC
I 系列		X		
指甲, 毛髮		- 毛髮形態 (2D, 3D)	16	2D / 3D
	- 毛髮顏色 (棕黃色, 棕色, 褐色)	BB / BR / BL		
亞細亞指甲	17	ACRN		
穿衣便	19	SC		
造型填充	- 海綿, 矽膠, 海綿和矽膠混合	21	F / S / F+S	
	拉鍊	帶拉鍊 (腳跟) / 不帶拉鍊 (NZ)	25	NZ
腳掌長度微至比腳趾短 10 毫米, 以便穿鞋。			<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
有特別的鞋裝要求嗎? (如有, 請提供有標示的鞋裝)			<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
去掉假肢上的腳趾以加強運動性。 (請把需要去掉的假肢腳趾寫在邊欄: _____)			<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
寄出正式產品, 同時請運右青模? (請留意, 我們已採用 3D 掃描技術儲存石膏模 / 假肢的資料。 故客戶之石膏模 / 假模會在製作過程中銷毀)			<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	

備註: _____

收集患者資料: 腳 (第一步)

- 測量尺寸
 - 可以觀看以下視頻了解如何測量尺寸:

<https://youtu.be/BU0McN9QNIo?t=12>

- 請勿將測量尺寸填寫在圖表上!
- 圖表只是參考, 並告知你製作時所需的測量數據

REGAL 皇室義肢有限公司
半訂做(SCM)訂購表格
型號HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 腳學截肢

V1.0.2022
PG.3/5

S4

1:1 圖測指引
1. 以(毫米□/英寸□)填寫以下頁面需要的尺寸。
2. 在圖表中用“+”號標記敏感區域的位置。
3. 請提供儘量多的尺寸, 這有助於製作更貼服的試樣產品。如需要, 可以在訂購表格上稍做修改。

這是一個例子,
請在下一頁勾畫腳的輪廓及填寫測量的數據

○ = 長度
□ = 圓周

電話: +852 2771 8991 傳真: +852 2384 5948 電郵: info@regalprosthesis.com 網址: www.regalprosthesis.com



香港皇室義肢有限公司 一間有著 ISO13485:2018 及 ISO9001:2015 認證的公司 值得您信賴的夥伴

收集患者資料: 腳 (第一步)

- 先於空白頁畫殘肢和健肢的型態

! 在圖紙上標記尺寸(請按照示意圖的測量要求, 不要漏掉任何測量)

- 右下角的圖示只作為參考

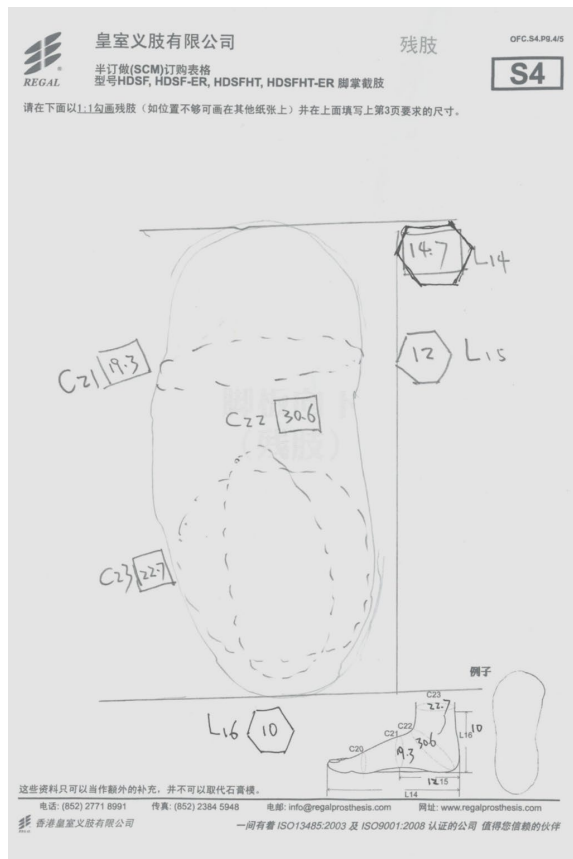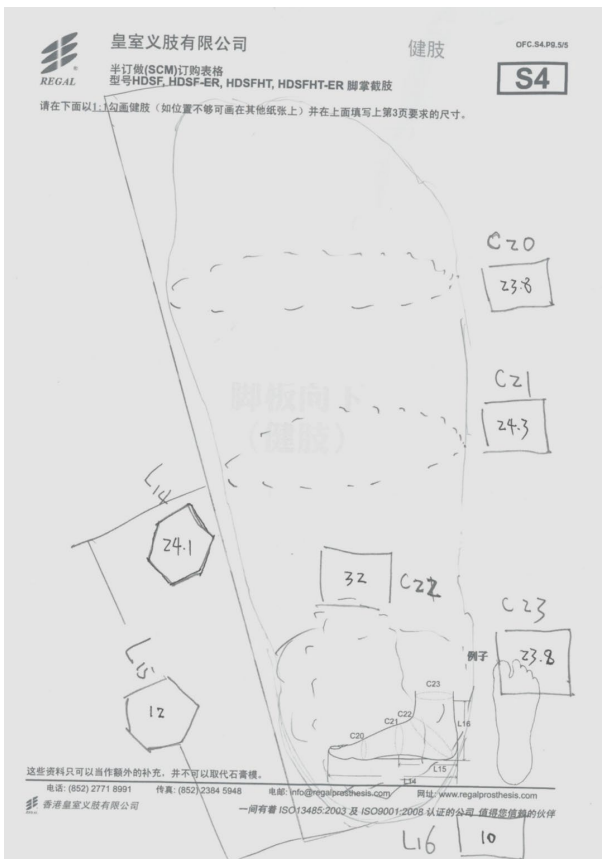

收集患者資料: 腳 (第二步)

- 拍攝健肢和殘肢的照片
 - 如果可以, 讓患者在站立的情況下拍照
 - 如果腳板底有敏感區域, 也需要拍照



收集患者資料: 腳 (第三步)


- 取型
 - 至少要為殘肢取模
 - 製作陽模
 - 至少要在模型上標記內側和後方的對線。這樣我們便能知道患者的站立的情況
 - 標記敏感點
 - 取型至少取至腳踝處往上70毫米
 - 如果患者會把鞋墊或矽膠襪穿進腳套, 請穿着鞋墊或矽膠襪一同取型

收集患者資料: 腳 (第三步)

- 取模後, 檢查石膏是否與圖紙上的尺寸相同

! 確保兩邊的數據差異不超過 4%



- 否則, 修磨石膏直至與圖紙數據相近

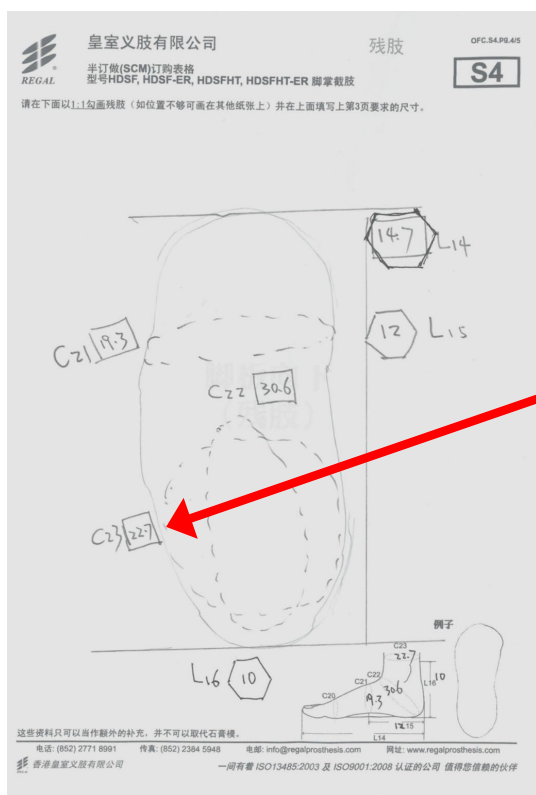

對比圖紙檢查尺寸

收集患者資料: 腳 (第三步)

⚠ 模型至少要標記內側和後方的對線

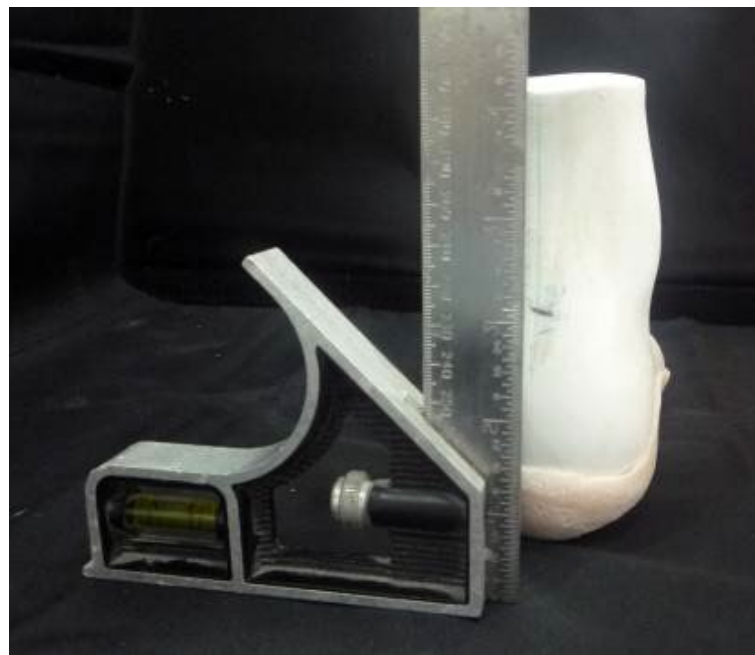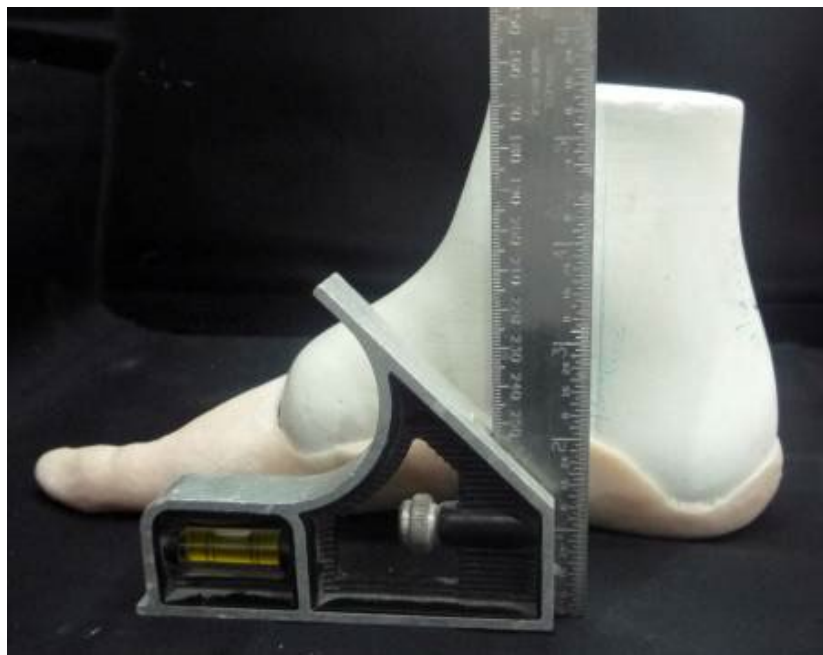

收集患者資料: iPhone 掃描石膏模型

你可以選擇不寄石膏模型給我們。

相反，你可以使用皇室的掃描套件。使用 iPhone 掃描石膏，然後把將STL檔案電郵給我們。這樣可以節省時間和快遞費用。




詳細請參考以下影片:


<https://youtu.be/4mhIEGeZf6E>

收集患者資料: iPhone 掃描石膏模型


- 掃描石膏時要注意：
 - 對於半掌, 手腕或手腕以上截肢患者, 石膏沒有明顯的手掌或手腕位置, 請於手掌和手腕位置黏上泥膠
 - 請將泥膠黏在內側和後方的對線上

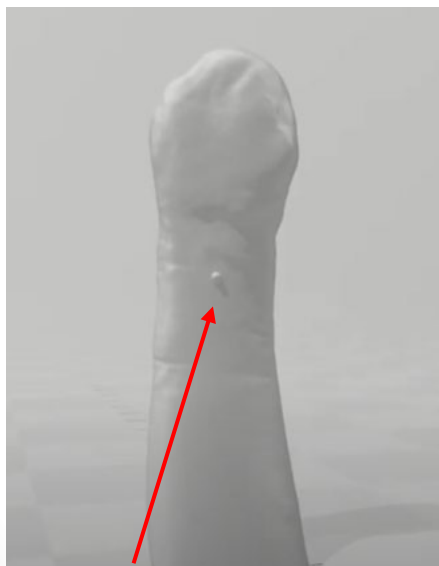

用泥膠表示手心面

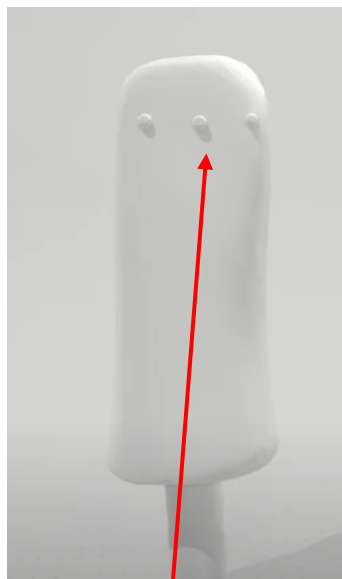

當手腕位置不明顯時,
用泥膠表示手腕位置

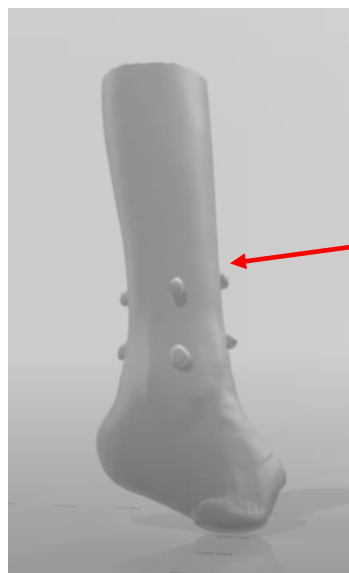

用泥膠代表對線
至少要有內側和後方的
對線

收集患者資料: iPhone 掃描石膏模型


- 在敏感區域黏上泥膠
- 當發送 stl 文件時沒有以上的資訊, 我們將沒法判斷那些信息



用泥膠代表敏感點

客戶確認單：試樣產品

- 當客戶服務員收到你的訂購表格、照片和石膏後，便會電郵回覆關於訂單詳情

 **請仔細閱讀電郵，裏面涵蓋很多重要的細節。**

- 如果確認內容，請回覆給客戶服務員。
- 否則，請提出疑問，直至同意電郵中所有的細節。
- 製作試樣產品需要 21 個工作天

患者姓名: 訂單號: 訂購日期:	內部參考:
請參閱以下回復:	
<ol style="list-style-type: none">我們將安排生產第一次試樣 (SCM-HDSF-ER-M-L-24-4)半訂做產品會帖服殘肢.綜合健殘肢的尺寸, 先試樣製作.按模型尺寸製作殘肢部分.截肢按圖紙尺寸製作.建議腳套長度做至比健肢短 10mm 以便穿鞋.建議縮小腳套前半掌的圓周 7mm 以便穿鞋.腳筒高度按模型劃綫.按建議做開口以便穿戴.按模型上的對線製作正式產品: 按型海綿填充.不加拉鏈.正式時腳套鑲入碳纖維(ER), 碳纖維在提起腳跟的時候提供更穩定的控制, 會令步伐更自然.	
收到您的確認後翌日開始計算:	
半訂造第一種流程形式: (先試樣后做正式產品)	
半訂做試樣產品會在大約 21 個工作天內準備好。	
半訂做正式產品會在大約 14 個工作天內準備好。	
半訂造第二種流程形式: (不做試樣直接做正式產品)	
半訂做正式產品會在大約 21 個工作天內準備好。	
更換之正式產品會在大約 14 個工作天內準備好。	

試樣產品

- 一旦確認所有細節後, 便會開始製作試樣產品
- 製作試樣產品需要 21 個工作天
- 請注意:
 - 試樣不是正式產品, 目的是檢查顏色和尺寸
 - 試樣沒有陰影, 只有底色
 - 試樣沒有指甲顏色, 沒有紅潤感
 - 試樣沒有提升項目
 - 即使訂購附有碳纖板的腳套, 試樣也不會有碳纖板
 - 若想在試樣中增加提升項目, 將會收取額外費用
 - 試樣並不包含在保修中
 - 若有皇室要求便需退回試樣

試樣產品修改

• 收到試樣後，根據以下內容給予反饋：


1. 顏色
2. 尺寸
3. 填充物舒適與否

• 準備修改表格並寫下反饋

• 可參考以下影片：

<https://youtu.be/QzvWuBU5OQE>

! 我們有TMOD1, TMOD2, TMOD3, TMOD4。請根據型號選擇合適的表格。



皇室義肢有限公司
半訂做(SCM)試樣產品修改表格
型號103半掌截肢用手套及型號200手指

V1.0.2022
Pg.2/2

TMOD1

病人姓名 _____ 公司名稱 _____
 訂單號碼 _____ 試樣產品的條碼 _____


顏色: 配稱
 修改為 _____

填充物: 舒適
 需要修改 (請修改試樣產品的內泡棉，與試樣產品一同寄給我們)

形態: 美觀
 需要修改 (請參閱2015年技術指引第22-26頁“試樣修改”部分，然後提供我們需要的資料)

尺寸: 合適
 需要修改 (請在下面的表格中填寫需要修改的尺寸，並在試樣產品上標記需要修改的部分)


修改位置 (C1-C17, L1-L10)	修改幅度 (毫米)

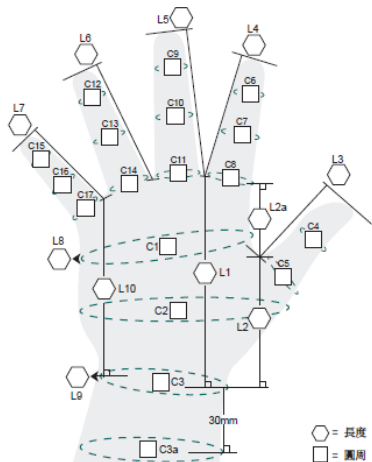

備註: _____

試樣產品修改: 顏色

- 試樣是由底色製成, 不包括指甲顏色或其他陰影
- 檢查所選的顏色是否與患者的膚色匹配
- 可以在試樣中更改顏色
- 客戶通常只更變 1 或 2 度顏色。
(例如, 色號1更改為1-2, 或2)

 如果改變顏色超過 2 度顏色, 我們會建議再做多次試樣。**(請緊記, 申請第三次試樣時, 將會收取額外費用)**

皇室義肢有限公司
REGAL 半訂做(SCM)試樣產品修改表格
型號103半掌載肢用手套及型號200手指

V1.0.2022
P8.2/2

TMOD1

病人姓名 _____ 公司名稱 _____
訂單號碼 _____ 試樣產品的條碼 _____


顏色: 配稱 修改為 _____ **如有需要可填寫新的顏色**

填充物: 舒適
 需要修改 (請修改試樣產品的內泡棉, 與試樣產品一同寄給我們)

形態: 美觀
 需要修改 (請參閱2015年技術指引第22-26頁“試樣修改”部分, 然後提供我們需要的資料)

尺寸: 合適
 需要修改 (請在下面的表格中填寫需要修改的尺寸, 並在試樣產品上標記需要修改的部分)

修改位置 (C1-C17, L1-L10)	修改幅度 (毫米)

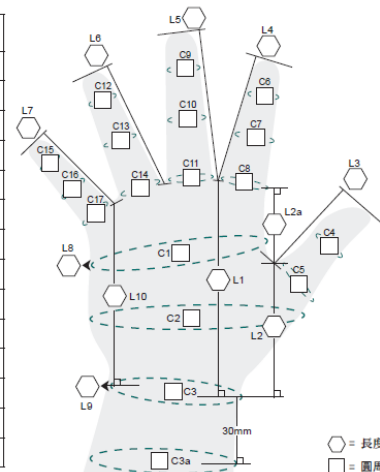

試樣產品修改：填充物

- 接下來，你需要反饋關於填充物部分，其中包括：
 - 穿戴是否舒適
 - 懸吊是否足夠
 - 填充物會否過多或太少
- 即使患者訂購按型矽膠填充或按型海綿加矽膠填充，試樣也只會提供海綿填充。這樣填充物才可以修改
- 檢查填充物是否合適，並確保填充物與殘端吻合

試樣產品修改: 填充物

⚠ 若填充物過多, 使用打磨機一點點地磨掉填充物, 直到患者感覺舒適。然後把修改後的試樣退回給我們。



試樣產品修改: 填充物

⚠ 若填充物太少, 用皇室矽膠泥(或任何矽膠泥)填補空隙, 讓患者再次穿戴試樣, 直到患者感覺舒適。然後將試樣連同填充退回給我們。



4-02-SP-A



4-02-SP-B



試樣產品修改: 尺寸

- 若筒口/開口位太松動時, 請按以下圖片在試樣上標記, 並拍照電

 郵給我們。 (無須退回試樣)

- 捏住鬆弛的位置





- 沿捏緊邊緣畫線



- 應該會出現一個三角形的標記








- 測量和寫下三角形的寬度和高度
例如從腕圍近端到三角形下39毫米, 減去25毫米 (請參見右圖)

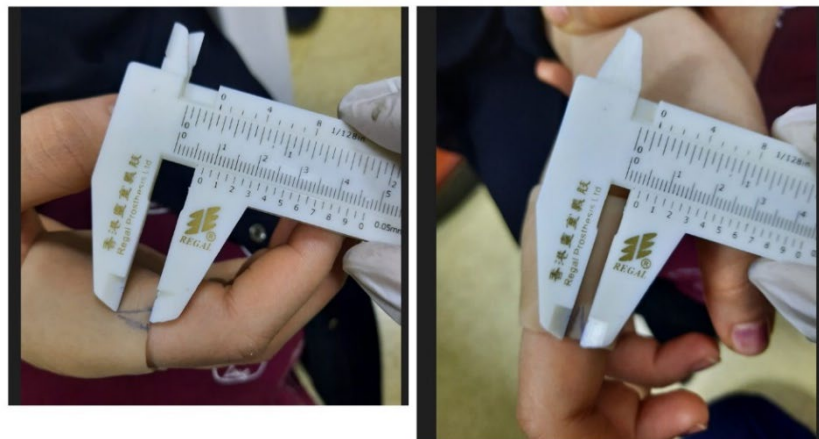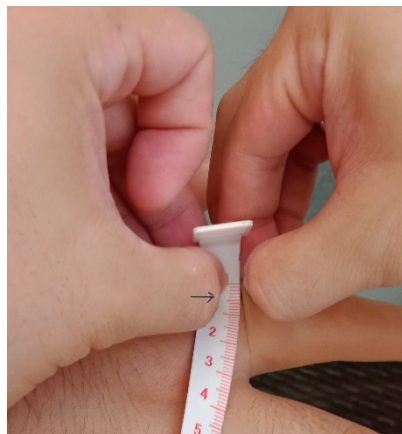


試樣產品修改: 尺寸

- 您也可以在試樣上標記如何修改尺寸, 並拍照電郵給我們(這些修改無須退回試樣)

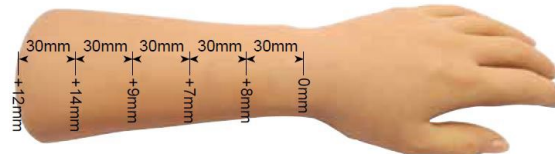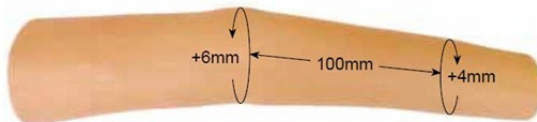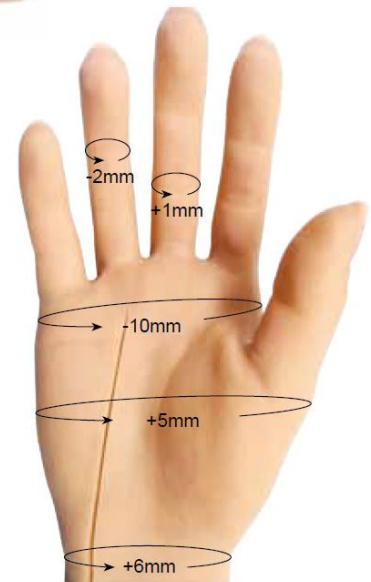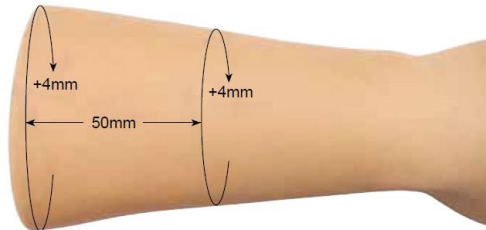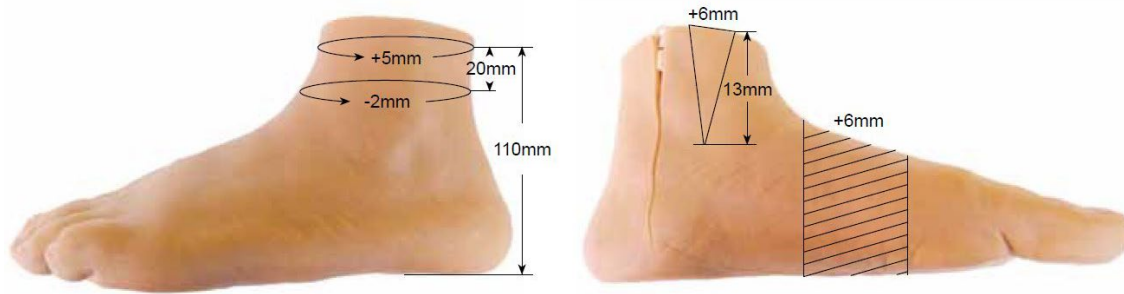

試樣產品修改: 尺寸

⚠ 可以標記手指彎曲的度數。(無須退回試樣)

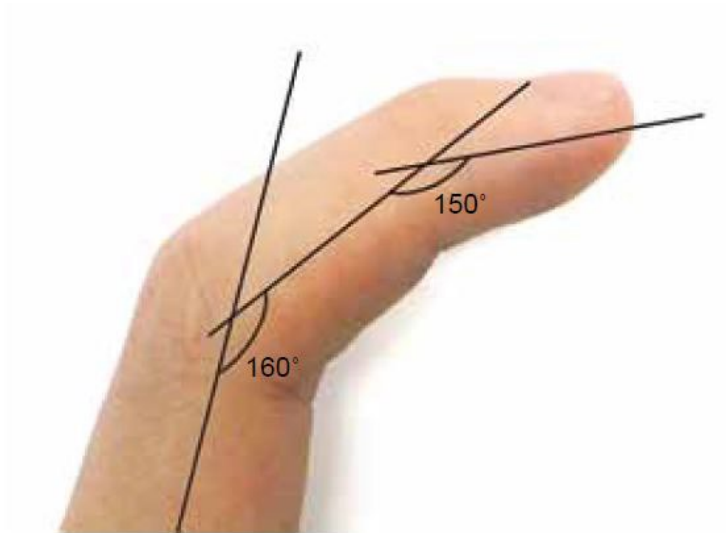

試樣產品修改: 尺寸

! 如果殘肢某些部位特別緊或受壓, 請於該處標記圓圈。(對於這類反饋, 必須把標記的試樣退回給我們)



$\varnothing 8\text{mm}$ 從半徑8毫米範圍壓力放鬆
 $\pm 3\text{mm}$ 標點位置壓力放鬆3毫米

如果開口位不夠大, 請畫圈標記新的開口位置, 並註明新開口的圓周與長度, 然後電郵照片給我們。(無須退回試樣)



手指開口位

試樣產品修改: 尺寸

- 對於拉鍊手套, 若前臂與筒口位太窄導致無法拉上拉鍊, 請在試樣前臂每30毫米標記需要加闊多少, 然後電郵照片給我們。

! (對於這些反饋, 無須退回試樣)



試樣產品修改

- 最後, 填寫試樣修改表格, 告訴我們您要更改的內容。

 在修改表格上, 填寫特定位置修改以+/- 表示。(見下頁示例一)

 千萬不要給新的尺寸! 根據試樣上的基礎調整尺寸

試樣產品修改

- 在這示例中,患者穿戴後覺得C3A和C3的位置太緊,所以便需要增加3毫米
- 根據位置上的代號,寫下需調整的尺寸



皇室義肢有限公司
半訂做(SCM)試樣產品修改表格
型號103半掌截肢用手套及型號200手指



V1.0.2022
Pg.2/2

TMOD1

病人姓名 陳大文 公司名稱 _____
 訂單號碼 _____ 試樣產品的條碼 _____

- 顏色: 配稱
 修改為 2 _____
- 填充物: 舒適
 需要修改 (請修改試樣產品的內泡棉, 與試樣產品一同寄給我們)
- 形態: 美觀
 需要修改 (請參閱2015年技術指引第22-26頁“試樣修改”部分, 然後提供我們需要的資料)
- 尺寸: 合適
 需要修改 (請在下面的表格中填寫需要修改的尺寸, 並在試樣產品上標記需要修改的部分)

修改位置 (C1-C17, L1-L10)	修改幅度 (毫米)
C3A	+3
C3	+3

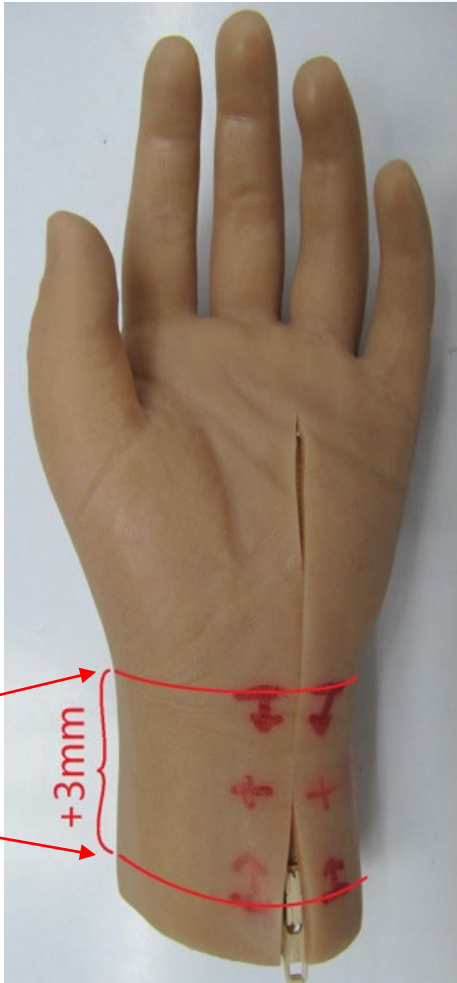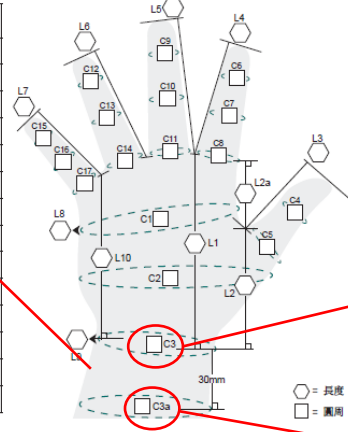


備註: _____

電話: +852 2771 9991 傳真: +852 2384 5948 電郵: info@regalprosthesis.com 網址: www.regalprosthesis.com
 香港皇室義肢有限公司 一間有著 ISO13485:2016 及 ISO9001:2015 認證的公司 值得您信賴的夥伴

示例一

客戶確認單：正式產品

- 當客戶服務員收到試樣修改表格，照片和退回的試樣後，便會電郵關於製作正式產品的詳情

 **請仔細閱讀電郵，裏面涵蓋很多重要的細節。**


- 如果確認內容，請回覆給客戶服務員。
- 否則，請提出疑問，直至同意電郵中所有的細節。
- 製作正式產品需要 14 個工作天

患者姓名: 訂單號: 訂購日期:	內部參考:
請參閱以下回復: <ol style="list-style-type: none">我們將安排生產正式產品 (SCM-103-F-L-M-C2-C3)尺寸按試樣。顏色按試樣，產品關節處會按常規加上紅潤感，指甲會常規製作。正式產品：標準海綿填充，此訂單手指不能加鐵線，請知悉。根據我們的內部標準，殘端離手指根部的距離最少要有 30mm 才可以加鐵線。正式產產品估計春節后寄貨。	
收到您的確認後翌日開始計算： 半訂造第一種流程形式：（先試樣后做正式產品） 半訂做試樣產品會在大約 21 個工作天內準備好。 半訂做正式產品會在大約 14 個工作天內準備好。	
*以上貨期在生產高峰期或許有變動。 如果您的客戶有特定交付日期要求，我們建議加急服務，因為我們只承諾加急服務的交付日期。 加急服半訂造不含提升項目在 8 個工作天內準備好，含提升項目時間會長些，改模具要多計算 4 個工作天，具體貨期待出貨部門通知。	
請確認以上內容，以便我們安排生產。	
請注意 <ol style="list-style-type: none">由 T3 開始每次試樣都要額外收費，請參考報價單。我們已採用 3D 掃描技術儲存石膏模/蠟模的資料，故客戶之石膏模/蠟模會在製作流程中銷毀。	

正式產品

- ⚠️ 穿戴試樣過程必須認真對待，並給予我們多方面的反饋。一旦根據試樣反饋完成正式產品，就不允許再作任何修改。
- ⚠️ 如果患者在正式產品中需要進一步更改，我們將將此視為新訂單並收取費用。
- ⚠️ 當你將正式產品交給患者時，請向患者說明保修與保養的細節。
 - 你可以從我們網站中下載我們的保修條款：
<https://regalprosthesis.com/web/zh-hant/download>
 - 有關維護的資料，請閱讀正式產品隨附的“使用說明”小冊子。

良好的保養

 我們的矽膠產品僅用於美觀效果，切勿將產品用於其他功能活動。否則，保修將失效。

- 請參閱以下影片了解如何保養矽膠產品：

https://youtu.be/72E_ojktsKg


良好的保養

- 手指義肢
 - 佩戴手指義肢時要注意會有真空效果，切勿用力從殘肢中拉扯手指義肢。
 - 當開口位出現小分裂時，不要忽視它。
 - 請送回皇室或診所，剪下裂口並打磨邊緣。否則，裂口會擴大並破壞整個義肢。
 - 如果患者使用它作為功能性用途(例如打字)，產品的保修將會無效
 - 如果患者希望手指義肢更加耐用，可以在下單時考慮訂購矽膠填充(標準為海綿填充)。



良好的保養

- 鐵線手指與被動指節
 - 切勿用力按壓手指
 - 切勿用手指搬動或提着物件

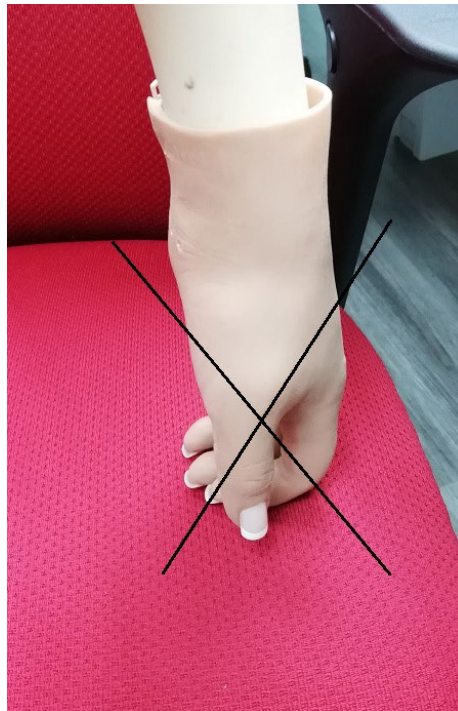

良好的保養

- 拉鍊手套

- 拉鍊與硅膠是一體成形，不可更換

 如果拉鍊破損而無法修復，患者便需要重新訂購義肢

- 穿脫時要完全拉開拉鍊。否則，開口位會很容易出現裂縫。
- 如果出現裂縫，請不要忽略它。
- 請送回皇室或診所，剪掉裂縫並打磨邊緣。否則，裂縫會擴大並破壞整個義肢。
- 每天清洗手套時，用牙刷清理拉鍊牙的污垢



良好的保養

- 腳套

- 拉鍊與義肢是一體成形，不可更換

! 如果拉鍊破損而無法修復，患者便需要重新訂購義肢

- 穿脫時要完全拉開拉鍊。否則，開口位會很容易出現裂縫。
- 如果出現裂縫，請不要忽略它。
- 請送回皇室或診所，剪掉裂縫並打磨邊緣。否則，裂縫會擴大並破壞整個義肢。
- 每天清洗腳套時，用牙刷清理拉鍊牙的污垢



使用矽膠義肢前後(手部)



穿戴前



穿戴後



使用矽膠義肢前後(手部)

穿戴前



穿戴後



使用矽膠義肢前後(手部)



穿戴前



穿戴後

使用矽膠義肢前後 (手臂)



穿戴前

穿戴後



使用矽膠義肢前後 (腳部)



穿戴前

穿戴後

