



# 如何保养 及清洁 硅胶产品

- 硅胶假肢应远离火源、溶剂及油性液体。不要将假肢浸泡在任何类型的溶剂中。



- 避免使用锋利的物品，例如刀或剪刀等。因为这些物品很容易割开或撕裂假肢。



- 请勿将假肢长时间暴露在阳光下，这样会导致假肢的颜色褪色。




- 如果假肢的边缘出现小裂缝，请将假肢送回给您的假肢技术员，以便修补裂缝。否则，小裂缝将继续扩大并破坏整个假肢。



- 请勿过度用力拉扯硅胶手指假肢，这样可能会撕裂假肢。在脱掉假肢前，可以捏住假肢边缘，让硅胶假肢和残肢之间有空气流进，以消除假肢和残肢之间的真空状态。



- 请勿过度用力拉扯硅胶手指假肢，这样可能会撕裂假肢。在脱掉假肢前，可以捏住假肢边缘，让硅胶假肢和残肢之间有空气流进，以消除假肢和残肢之间的真空状态。

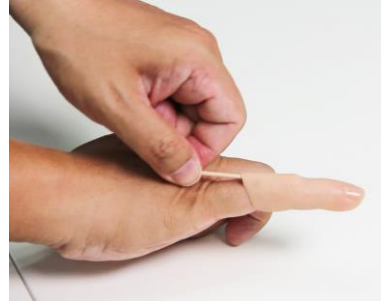

- 如有污渍需立刻用温和的肥皂和水清除。如不立刻清除，污渍可能会固化在假肢上。这种情况并不在我们保修的范围内。
- 为了保持卫生，我们建议每天使用温和的肥皂和水清洁假肢。



- 使用小物品, 例如绷带、戒指、手镯、运动腕带或手表等来覆盖假肢的边缘，令其结合处过渡更自然逼真。



- 当使用有拉链的硅胶假肢时，在穿脱假肢时，请先确保拉链是完全拉开。如拉链没有完全拉开就穿或脱，拉链会很容易损坏。每天使用水和柔软的牙刷清洁拉链，轻轻刷洗拉链齿并便可清除污垢。



- 对于配备铁线手指、被动指节或腕接头的型号，请勿对假肢施加过大压力，例如支撑身体或搬运任何物体。请确保硅胶假肢远离火源、溶剂及油性液体。不要把假肢浸泡在任何类型的溶剂中，这样做会损坏铁线手指或被动指节，并且会因不当使用铁线手指或被动指节，导致产品断裂而令患者受伤。请勿使用手指假肢打字或搬运物品。我们的硅胶假肢只供美容的用途。



- 请勿自行拆除假肢内部填充物，否则会导致保修失效。

