



如何保養 及清潔 矽膠產品

- 矽膠義肢應遠離火源、溶劑及油性液體。不要將義肢浸泡在任何類型的溶劑中。



- 避免使用鋒利的物品，例如刀或剪刀等。因為這些物品很容易割開或撕裂義肢。



- 請勿將義肢長時間暴露在陽光下，這樣會導致義肢的顏色褪色。



- 如果義肢的邊緣出現小裂縫，請將義肢送回給您的義肢矯形師，以便修補裂縫。否則，小裂縫將繼續擴大並破壞整個義肢。



- 請勿過度用力拉扯矽膠手指義肢，這樣可能會撕裂義肢。在脫掉義肢前，可以捏住義肢邊緣，讓矽膠義肢和殘肢之間有空氣流進，以消除義肢和殘肢之間的真空狀態。



- 如有污漬需立刻用溫和的肥皂和水清除。如不立刻清除，污漬可能會固化在義肢上。這種情況並不在我們保修的範圍內。

- 為了保持衛生，我們建議每天使用溫和的肥皂和水清潔義肢。



- 使用小物品，例如繃帶、戒指、手鐲、運動腕帶或手錶等來覆蓋義肢的邊緣，令其結合處過渡更自然逼真。



- 當使用有拉鍊的矽膠義肢時，在穿脫義肢時，請先確保拉鍊是完全拉開。如拉鍊沒有完全拉開就穿或脫，拉鍊會很容易損壞。每天使用水和柔軟的牙刷清潔拉鍊，輕輕刷洗拉鍊齒並便可清除污垢。



- 對於配備鐵線手指、被動指節或腕接頭的型號，請勿對義肢施加過大壓力，例如支撐身體或搬運任何物體。
請確保矽膠義肢遠離火源、溶劑及油性液體。
不要把義肢浸泡在任何類型的溶劑中，這樣做會損壞鐵線手指或被動指節，並且會因不當使用鐵線手指或被動指節，導致產品斷裂而令患者受傷。
請勿使用我們的手指義肢打字或搬運物品。我們的矽膠義肢只供美容的用途。



- 請勿自行拆除義肢內部填充物，否則會導致保修失效。

